

Dr. Supporter リカバリーパッチ

【形状・構造及び原理等】



サイズ：直径 22mm 1 シート 10 枚 ×5 シート入

素 材：ポリエステル／レーヨン／アクリル系粘着剤／上質紙

本製品は数種類の鉱物を組み合わせたミネラル結晶体を含浸加工した素材を使ったパッチ型の医療機器です。

素材に含浸加工されたミネラル結晶体を身体に接触させることで、血管の内皮細胞から産生される一酸化窒素を増量させることにより血管が拡張し、血液の流れを促進し、体温上昇作用により家庭用温熱パックとしての機能を果たします。

【使用目的または効果】

血行促進による疲労回復、筋肉の疲れやこりの緩和

【使用上の注意】

- ・ 湿疹・かぶれ・傷口・粘膜部分や皮膚の柔らかい部分には使用しないでください。
- ・ 敏感肌の方、かぶれやすい方は、あらかじめパッチテストを行うことをおすすめします。
- ・ かぶれ・発疹・発赤・かゆみ等の症状が現れた場合は、ただちにご使用を中止し、医師等にご相談ください。
- ・ はがすときには皮膚を傷めないように、体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
- ・ 同じ場所に何度も貼り・はがしを繰り返すと、腫れや痛みの原因となりますのでご注意ください。
- ・ ご使用后、皮膚に貼り跡が残る場合があります。しばらくすると消えますが、体質や体調によってまれに色素が残る場合がありますので、貼る場所にはご注意ください。
- ・ 肌が乾いた状態でご使用ください。
- ・ スポーツ時などは汗等で剥がれやすくなる場合があります。

【使用方法等】

1. 貼る部位の汗や油脂を拭き取ります
2. 素肌に直接パッチを貼ります

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

【製造販売業者氏名又は名称等】

株式会社ティコク製薬社
大阪府枚方市春日西町1丁目31-10

【製造業者氏名又は名称等】

株式会社ティコク製薬社
大阪府枚方市春日西町1丁目31-10

【販売業者氏名又は名称等】

株式会社リグア
大阪府大阪市中央区淡路町2丁目6-6 淡路町パークビル2号館
お客様相談室 0120-77-1239