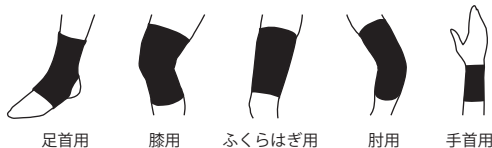


器 12 理学診療用器具

一般医療機器 温熱用パック 37240010 (JMDN コード)

Dr. Supporter リカバリーサポーター**【形状・構造及び原理等】**

本製品は数種類の鉱物を組み合わせたミネラル結晶体を含浸加工した素材を使ったサポーター型の医療機器です。素材に含浸加工されたミネラル結晶体を身体に接触させることで、血管の内皮細胞から産生される一酸化窒素を増量させることにより血管が拡張し、血液の流れを促進し、体温上昇作用により家庭用温熱パックとしての機能を果たします。

対象部位	サイズ表記	寸法
足首	フリーサイズ	足首周り 16～26cm
膝	M	太もも周り 25～40cm
	L	太もも周り 30～45cm
	LL	太もも周り 40～55cm
ふくらはぎ	M	脛脛周り 18～32cm
	L	脛脛周り 20～40cm
肘	M	二の腕周り 20～30cm
	L	二の腕周り 23～38cm
手首	フリーサイズ	手首周り 14～23cm

素材：綿／アクリル／ポリエステル／ナイロン／ポリウレタン

【使用目的または効果】

血行促進による疲労回復、筋肉の疲れやこりの緩和

【使用方法等】

- ・ ひじ、手首、ひざ、ふくらはぎ、足首それぞれの部位に適した製品として着用して下さい。
- ・ 適正サイズを選び着用して下さい。
- ・ 本製品は再使用するものです。
- ・ 本製品は日常活動時に着用することができます。

【使用上の注意】

- ・ ご使用中、発疹・かゆみ・かぶれ等お肌に異常が表れた場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・ 発疹・あせも・傷などがある場合は、使用しないでください。
- ・ 無理なサイズでの使用やズレた着用も含む指定部位以外の着用、他商品との重ね履きはしないでください。
- ・ 就寝時の着用はお避けください。
- ・ 弾性繊維を使用している為、商品ごとに若干の寸法違いが生じることがありますが、使用にはまったく問題ございません。
- ・ 衣類とこすれることによって、ズレ落ちる場合がございます。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 火の近くや高温になる場所には置かないでください。
- ・ 快適な使用の為に、こまめに洗濯をし陰干しをしてください。
- ・ 小児の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 移染の恐れがありますので、色の異なるものとは別に洗濯をしてください。
- ・ 乾燥機、アイロン、塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。

【製造販売業者氏名又は名称等】

株式会社テイクコ製薬社
大阪府枚方市春日西町1丁目31-10

【製造業者氏名又は名称等】

株式会社テイクコ製薬社
大阪府枚方市春日西町1丁目31-10

【販売業者氏名又は名称等】

株式会社リグア
大阪府大阪市中央区淡路町2丁目6-6 淡路町パークビル2号館
お客様相談室 0120-77-1239