

医 04 整形用品


一般医療機器 家庭用温熱パック 71019000(JMDN コード)

Dr. Supporter リカバリーテープ

【形状・構造及び原理等】

サイズ：50mm×5m

素 材：綿／アクリル系粘着剤／上質紙

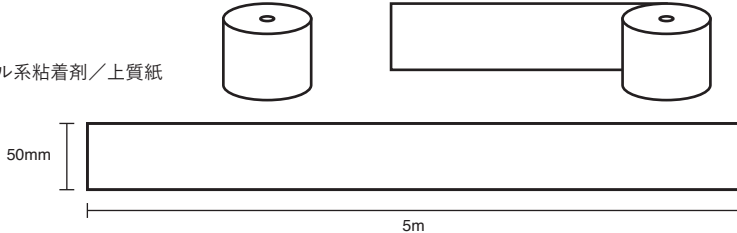

本製品は数種類の鉱物を組み合わせたミネラル結晶体を含浸加工した素材を使ったテープ型の医療機器です。

素材に含浸加工されたミネラル結晶体を身体に接触させることで、血管の内皮細胞から産生される一酸化窒素を増量させることにより血管が拡張し、血液の流れを促進し、体温上昇作用により家庭用温熱パックとしての機能を果たします。

【使用目的または効果】

血行促進による疲労回復、筋肉の疲れやこりの緩和

【使用上の注意】

- ・ ご使用中に発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には、ご使用を中止してください。
- ・ ご使用により痛みが増した場合には、直ちにテープをはがしてください。
- ・ 傷、発疹などの皮膚炎、その他障害のある部位には使用しないでください。
- ・ 皮膚を清潔で乾いた状態してから貼ってください。
- ・ 必要以上に引っ張って貼った場合、皮膚かぶれや水泡が発生しやすくなりますのでご注意ください。
- ・ 剥がす際には、皮膚を傷めないように体毛の流れに沿ってゆっくり剥がしてください。
- ・ 粘着剤が皮膚に残った場合、ガーゼやタオル等に石鹸水を含ませて優しく拭き取ってください。
- ・ 筋肉を伸ばした状態でテープの端を貼り付け、テープを引っ張らないようにして少しずつ貼ってください。

【使用方法等】

1. 貼る部位の汗や油脂を拭き取ります
2. 貼る部位に応じた長さにテープを切ります
3. 素肌に直接テープを貼ります

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

【製造販売業者氏名又は名称等】

株式会社テイクコ製薬社
大阪府枚方市春日西町1丁目31-10

【製造業者氏名又は名称等】

株式会社テイクコ製薬社
大阪府枚方市春日西町1丁目31-10

【販売業者氏名又は名称等】

株式会社リグア
大阪府大阪市中央区淡路町2丁目6-6 淡路町パークビル2号館
お客様相談室 0120-77-1239